


# EINBAUANLEITUNG

Plattenset für Splitex® und Gleichschaltung mittels Zentrierschlüssel  
kompatibel mit Splitex® für Artikulator CA 3.0 LARGE

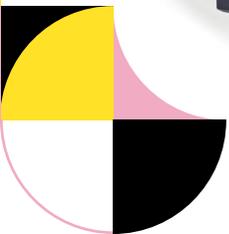

## Benötigte Candulor Komponenten



759234 – Plattenset für Splitex®



759235 – Zentrierschlüssel  
kompatibel mit Splitex®



759233 – Artikulator CA 3.0 LARGE

## Zusätzlich benötigte Komponenten

2-Komponenten Metallkleber, hitzebeständig und schnell härtend, z.B. Loctite 2-Komponentenkleber von Henkel, Metallkleber von Mälzer Dental oder Kombi-Metallkleber von Bison

## Einbauanleitung

1.




Der CA 3.0 LARGE ist bereit für das Verkleben des Plattenset für Splitex® und zur Gleichschaltung. Die roten Modellplatten sind vorher zu entfernen.

2.



Den Artikulator auf dem Kopf stehend öffnen und Metallkleber in die dafür vorgesehene Aussparung der Sockelplatte geben.

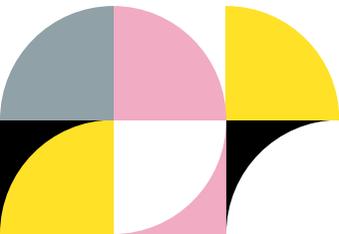

3.



Die Sockelplatte in das Artikulatoroberteil einsetzen. Das Magnet fixiert die Sockelplatte und der Kleber sorgt für den dauerhaften Halt. Den Kleber mindestens 90 Min. aushärten lassen. Erst im Anschluss die untere Platte verkleben.

4.



Den Zentrierschlüssel zusammen mit der Justiersockelplatte in den Artikulator setzen und Metallkleber mittig auf der Justiersockelplatte auftragen. **Wichtig: Einstellen des Vertikalstiftes auf die Position 0!**

5.



Den Artikulator auf dem Kopf stehend schliessen.

6.



Den Artikulator mit einem Gummiband fixieren und den Kleber für ca. 90 Min. aushärten lassen.


7.



Gleichgeschalteter Artikulator CA 3.0 LARGE inklusive Plattenset für Splitex® mit einem Baumass von 126 mm.

## Rechtliche Hinweise

- Alle Angaben dieser Dokumentation wurden mit grösster Sorgfalt erarbeitet, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
- Keine juristische Verantwortung auf Folgen von fehlerhaften Angaben oder unsachgemäßem Gebrauch.
- Splitex® ist eine eingetragene Marke der Amann Girrbach GmbH, 75177 Pforzheim, DE

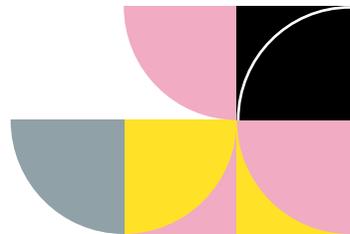

 **CANDULOR AG**

Boulevard Lilienthal 8  
8152 Glattpark (Opfikon)  
Switzerland  
Tel + 41 (0) 44 805 90 00  
candulor@candulor.ch  
www.candulor.com

 **CANDULOR Dental GmbH**

Am Riedergraben 6  
78239 Rielasingen-Worblingen  
Germany

**CANDULOR. HIGH END ONLY.**

