

For more information.
<https://eifu.candulor.com>

751952/DE+EN/2021-02-01



CANDULOR AG
Boulevard Lilienthal 8
CH-8152 Glattpark (Opfikon)
T +41 (0) 44 805 90 00
F +41 (0) 44 805 90 90
candulor.com
candulor@candulor.ch

X PLEX

**SCHLAGZÄH-MODIFIZIERTES
HEISS- UND KALTPOLYMERISAT
FÜR PROTHESEN**

**COLD/HOT-CURING HIGH
IMPACT DENTURE BASE
MATERIAL**

**KURZANLEITUNG
QUICK GUIDE**

COLD

KALTVERARBEITUNG / COLD PROCESSING MISCHUNGSVERHÄLTNIS / MIXING RATIO



0 min Anmischen / Mixing (30 sec)

0,5 min Anquellzeit / Soaking time

1,5 min Start Fließphase für
Giesstechnik / Start pouring
phase for pouring technique



8 min Start Verarbeitung für Press-
verfahren / Start processing
for packing technique



12 min Ende der Verarbeitungszeit /
End of processing time

HOT

HEISSVERARBEITUNG / HOT PROCESSING MISCHUNGSVERHÄLTNIS / MIXING RATIO



0 min Anmischen / Mixing (30 sec)

0,5 min Anquellzeit / Soaking time



12 min Start Verarbeitung /
Start processing



40 min Ende der Verarbeitungszeit /
End of processing time